



Produktdetails / product details:


PCN
 AT1000003740

PZN / PPN

GTIN
 4251208806567

Aufbau / specification:

gako unguator Vaginalapplikator
 gako unguator vaginal applicator

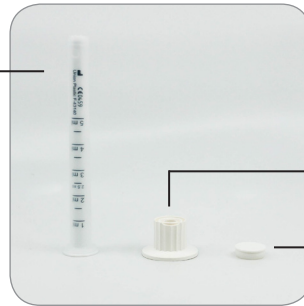

Kupplung für Vaginalapplikator
 coupling for vaginal applicator

Verschlusskappe für Kupplung Vaginalapplikator
 cap for coupling vaginal applicator



Anwendung / How to use:



Für die Anwendung wird eine befüllte Kruke, der Applikator, die Kupplung sowie die Verschlusskappe benötigt.


For use you need a filled jar, an applicator, the coupling and the cap.

Die weiße Schraubkappe wird entfernt und die Kupplung wird vollständig auf die Gewindeöffnung geschraubt. Wenn noch nicht erfolgt, die Creme deckelnah schieben so dass sich keine Luft mehr in der Kruke befindet.

Remove the white lid and screw the coupling completely onto the thread opening. If not already done, move the ointment all the way towards the lid, so there is no air left in the jar.

Das Innenteil des Applikators ist bis ganz nach unten geschoben. Der Applikator wird anschließend auf die Kupplung fest aufgesteckt (einrasten bemerkbar).

Move the inner part of the applicator all the way down. Firmly attach the applicator onto the coupling (snaps into place).

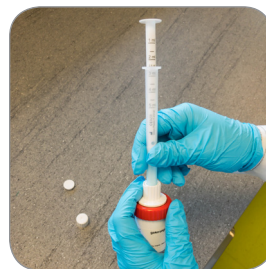

Mit Hilfe des verschiebbaren Krukenbodens wird die Creme in den Applikator überführt. Am oberen Ende des durchsichtigen Teils des Applikators kann auf dem weißen Innenteil anhand der Skala die genaue Menge abgelesen werden welche sich im Applikator befindet.

To transfer the ointment into the applicator use the movable bottom. With the white inner part and the scale on the transparent part the exact amount of content inside the applicator can be measured.

Wenn die gewünschte Menge abgegeben ist, kann der Applikator abgezogen werden und die Creme appliziert werden.

If the needed amount is dispensed, the applicator can be removed and the ointment applied.

Um den Inhalt der Kruke luftdicht zu verschließen wird die Kappe auf die Kupplung gesteckt und fest gedrückt. Bei der nächsten Anwendung kann die Kappe leicht durch die hierfür vorgesehene Kerbe an der Kupplung entfernt werden.

To close the jar airtight put the cover onto the coupling and push it firmly down. To remove the lid easily use the provided notch onto the coupling.